

亮藍網膜眼用染劑

AJL BBG Ophthalmic Solution

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

衛部醫器輸字第 031603 號

■ 產品敘述

AJL BBG 0.025% (亮藍網膜眼用染劑) 是一種具生理性 pH 及等滲透壓的眼內緩衝溶液。本產品是一個具有選擇性的組織染劑，可用眼科手術中作為醫療輔助。

■ 用途

使用本產品可提供內界膜 (Internal Limiting Membrane, ILM) 較佳的視線，簡化玻璃體視網膜手術。

■ 禁忌症

- 對成份中任何物質過敏的病患不應該使用本產品。
- 孩童及孕婦不適用。

■ 警告及注意事項

建議注射本產品溶液後，應該立即用吸除術/生理鹽水灌洗術將多餘的染料移除。

已知重複使用此染劑可能風險包括以下：

- 重複使用具有引發患者感染的潛在風險。
- 醫療用品設備的污染可能會導致患者受傷。
- 再次處理可能危及用品的結構完整性、無菌狀態和功能性。

■ 供應方式

本產品的包裝方式為無菌拋棄式 1cc 預裝於玻璃注射器。本產品使用蒸氣滅菌程序。

■ 不良反應

- 有過敏體質的病患可能會發生過敏反應。
- 可能發生術後發炎反應或角膜水腫。

■ 臨床應用

本產品應直接注射於眼睛的玻璃體腔內，任何部份的內界膜接觸到色劑將會被染色，藉此與以下的視網膜組織和視網膜前膜做分別。多餘的染劑應該用灌洗術與/或吸除術移除。染料並不會穿透視網膜，因此可以讓內界膜更容易被觀察到。

■ 使用說明

醫療用品應該在無菌手術區域中打開。打開包裝後取出內容物。將針頭套在注射器上並檢查組裝是否正確。輕輕推動柱塞推出幾滴溶液，避免將氣泡注射進入眼睛後房。預充式注射器這時已經準備好可以使用了。

■ 手術過程

手術過程取決於每位外科醫生，而每位醫師應該接受過這手術的相關訓練。本公司不會承擔外科醫師使用本產品的手術過程中對病患造成的任何損傷之責任。推薦使用 27G 針頭，以及用主動吸除術去除過量的染料。

■ 儲存方式

不能儲存低於 5°C 以下。避免日曬。

■ 成份


每 C.C 0.025% AJL BBG 含有：

AJL BBG 0.025%	
NaCl	8.2mg
Na ₂ HPO ₄ ·2H ₂ O	1.9mg
NaH ₂ PO ₄ ·2H ₂ O	0.3mg
Brilliant Blue G	0.25mg
Water for injection	c.s.p



SINGLE USE

單次使用

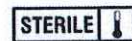

ESTERILIZED BY STEAM

使用蒸氣滅菌



SEE USE INSTRUCTIONS

請參閱使用說明書



DO NOT RESTABILIZE

不能重新滅菌



NOT TO STORE UNDER 5°C

不可保存於低於 5°C 溫度



DO NOT USE DAMAGED PACKAGE

包裝破損時不要使用



PROTECT FROM LIGHT

避免日曬

製造廠名稱: AJL OPHTHALMIC S.A.

製造廠地址: C/Ferdinand Zeppelin 1, Parque Tecnológico de Álava-01510 Miñano, Álava, Spain

藥商名稱: 正杏實業有限公司

藥商地址: 依所轄衛生局最新核定之藥商地址內容刊載